

Установка несъёмных ортодонтических аппаратов FitFree с кортикальной опорой

Одноэтапный протокол

Данная инструкция - это результат многолетней совместной работы ортодентов, хирургов и инженеров. Всё изложенное в ней проверено клинически и имеет техническое обоснование. Выполняйте все рекомендации, указанные в инструкции.

ВВЕДЕНИЕ

Система несъемных аппаратов FitFree с кортикальной опорой позволяет устанавливать и винты Орто Изи, и ортодонтический аппарат за одно посещение (одноэтапный протокол) или винты Орто Изи – за первое посещение, а аппарат – за второе (двухэтапный протокол).

Одноэтапный протокол

Установка небных винтов и аппарата за одно посещение

Вы получаете в посылке:

- ортодонтический аппарат;
- хирургический шаблон;
- винты Орто Изи;
- скрепляющие винты.

Удобство работы: Вы устанавливаете и винты Орто Изи, и ортодонтический аппарат за одно посещение.

ВНИМАНИЕ! Соблюдайте все рекомендации, указанные в инструкции.

Если винты Орто Изи будут установлены с погрешностью, аппарат не припасуется.

Двухэтапный протокол

Установка небных винтов и аппарата за два посещения

Вы получаете в первой посылке:

- хирургический шаблон;
- винты Орто Изи;
- скрепляющие винты.


Изготовленный аппарат Вы получаете во второй посылке.

Гарантия. Так как аппарат изготовлен с учетом фактического положения винтов Орто Изи, он гарантированно припасуется.

ВНИМАНИЕ! Соблюдайте все рекомендации, указанные в инструкции. Несмотря на гарантию успешной припасовки аппарата, при неточной установке винтов Орто Изи можно нанести вред пациенту.

2
шаг

Выполните анестезию
привычным способом

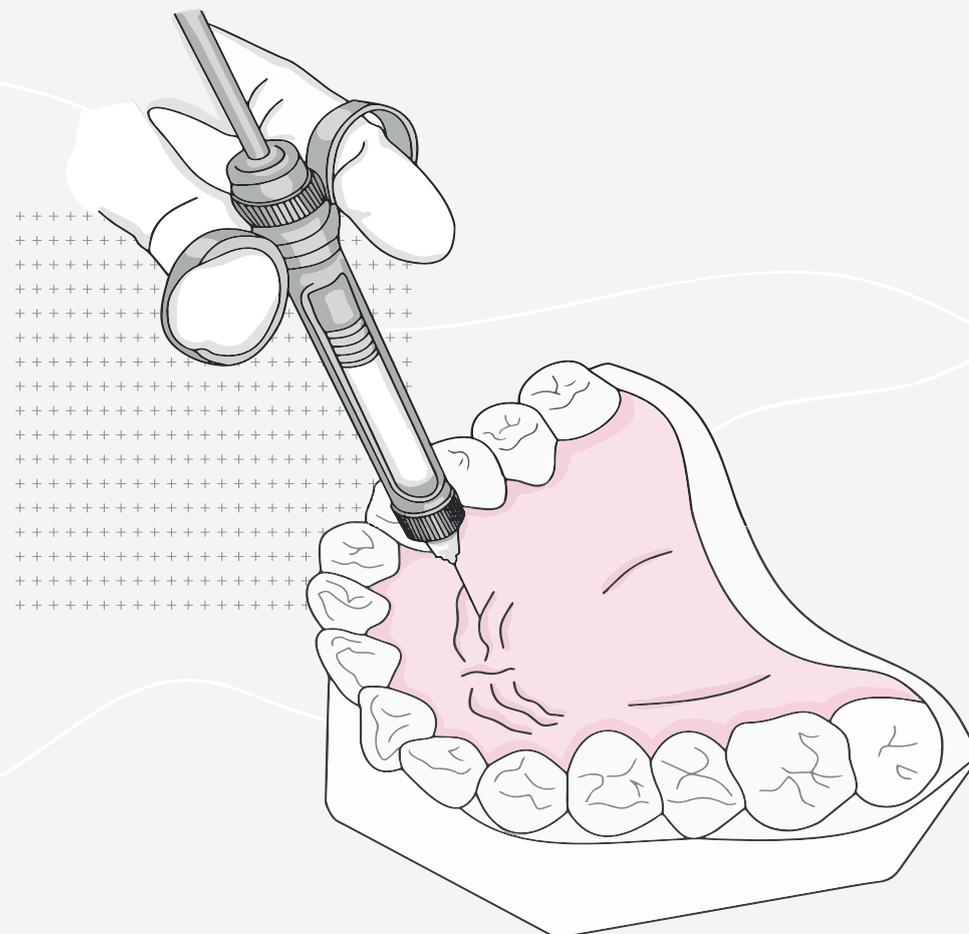


3
шаг

Установите имплантовод в угловой наконечник физиодиспенсера


МЫ РЕКОМЕНДУЕМ использовать физиодиспенсер потому, что:

- 1. Вы не напрягаете руку,** в которой держите угловой наконечник - не приходится вращать поворотную часть механической угловой отвертки. Угловой наконечник вместе с шаблоном не будет отклоняться от оси, смещаться и балансировать в полости рта, и винты установятся корректно;
- 2. Вы можете настроить** необходимые параметры физиодиспенсера для установки винтов Орто Изиди: торк – 35 Н*см, частота вращения – 30 об./мин

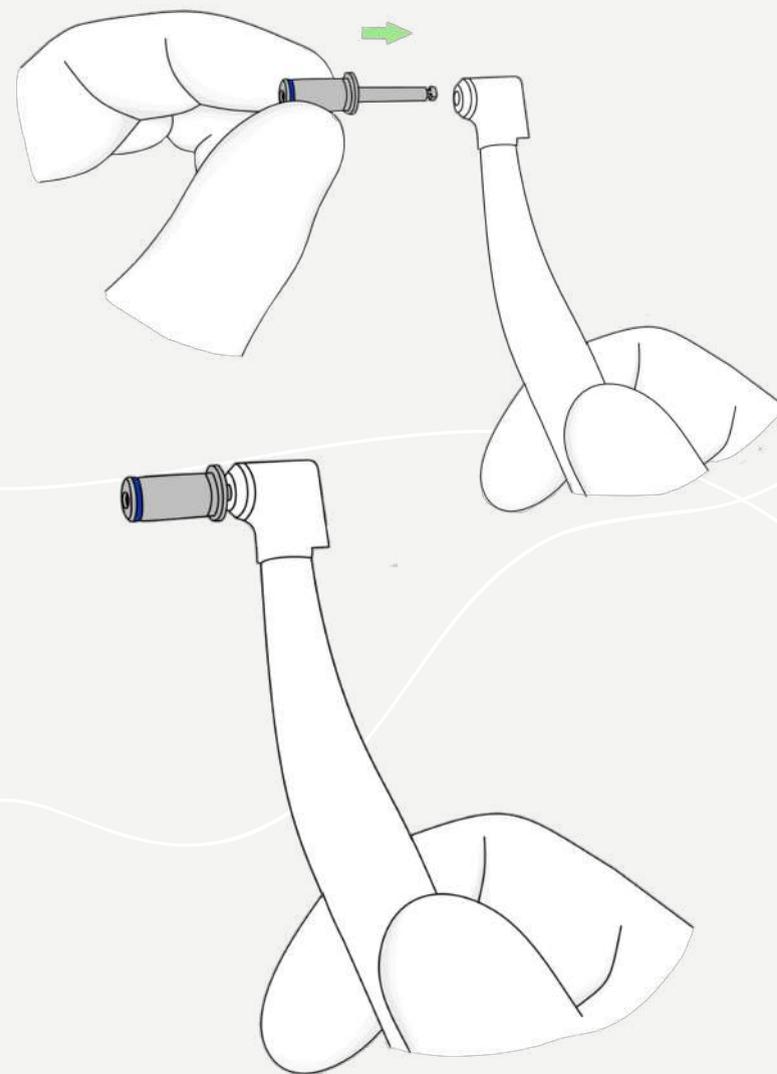

4
шаг

Установите винт Орто Изид
в имплантовод

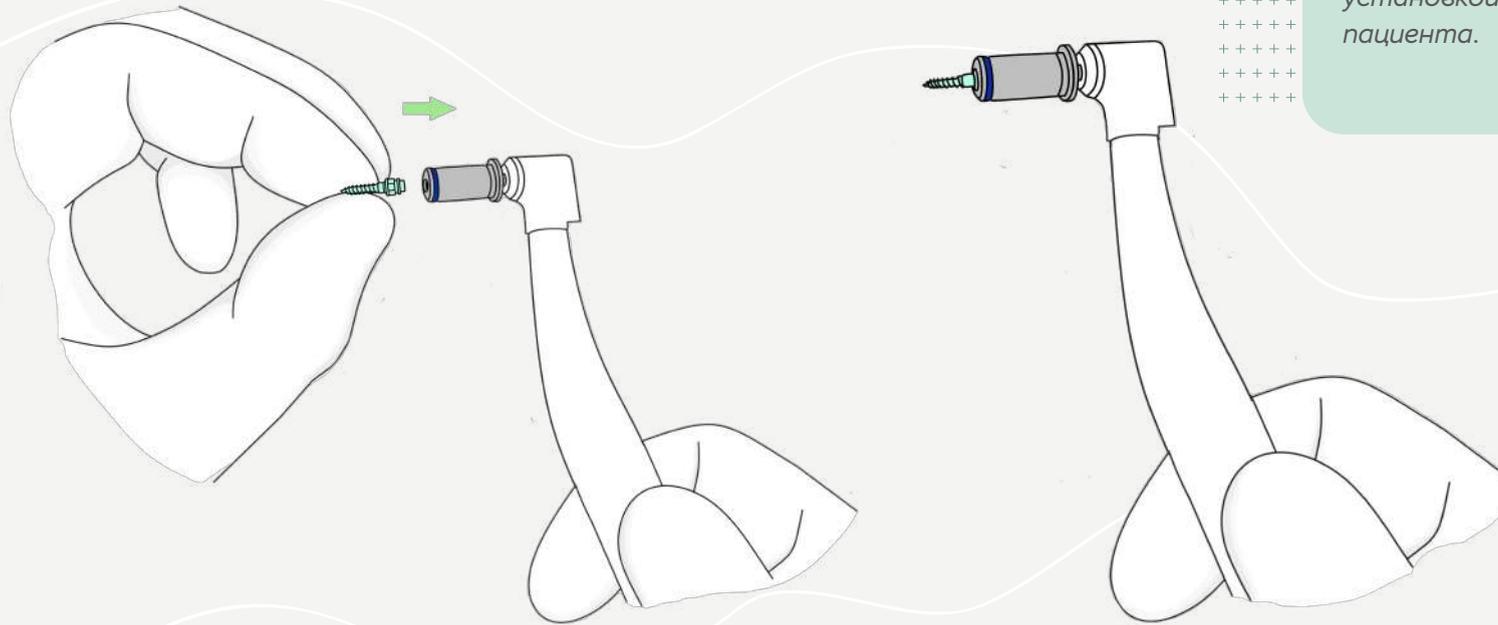

При правильной установке винта Орто Изид Вы услышите характерный щелчок – это винт зафиксировался в имплантоводе от выпадения.


+++++

ВАЖНО!

Всегда устанавливайте винт Орто Изид в имплантовод непосредственно перед установкой хирургического шаблона на зубах пациента.

7
шаг

Извлеките шаблон и угловой
наконечник с имплантопроводом
из полости рта

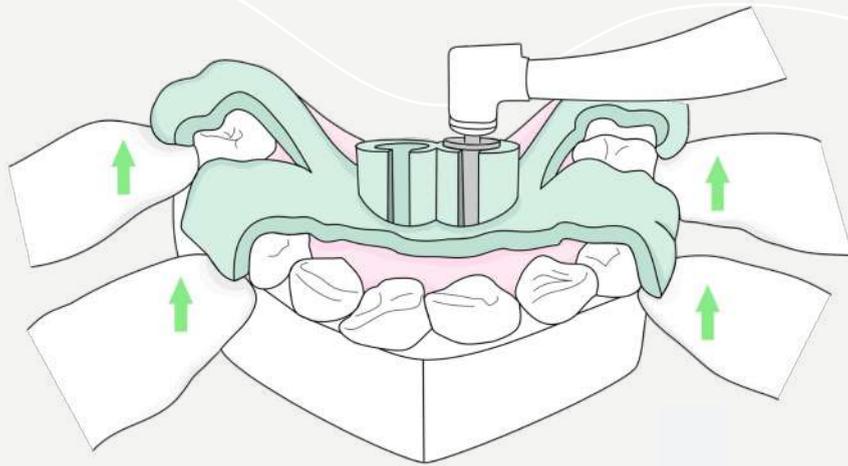


Для этого попросите ассистента поддеть шаблон 4 пальцами вдоль направления установки винта Орто Изид. В это время придерживайте угловой наконечник.

+++++

ВАЖНО!


Если для Вашего пациента изготовлен аппарат с опорой на винты Орто Изид и зубы, Вы можете проверить правильность установки винтов, примеряя аппарат после установки каждого из них. Если аппарат с опорой только на винты Орто Изид, проверить правильность их установки можно только после установки всех винтов.

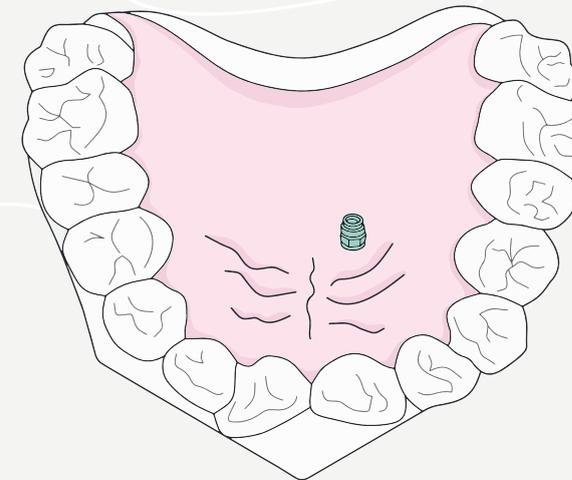

8-13
шаг


Установите второй
винт Орто Изи

Для установки второго и каждого
последующего винта повторите
шаги 3-7.

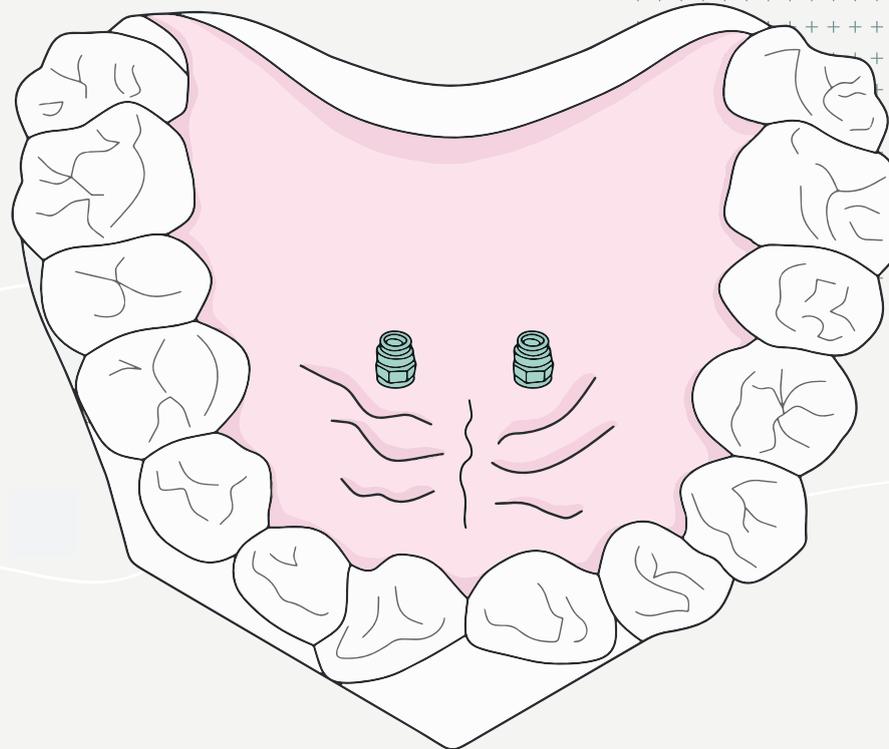

15
шаг

Зафиксируйте скрепляющие винты

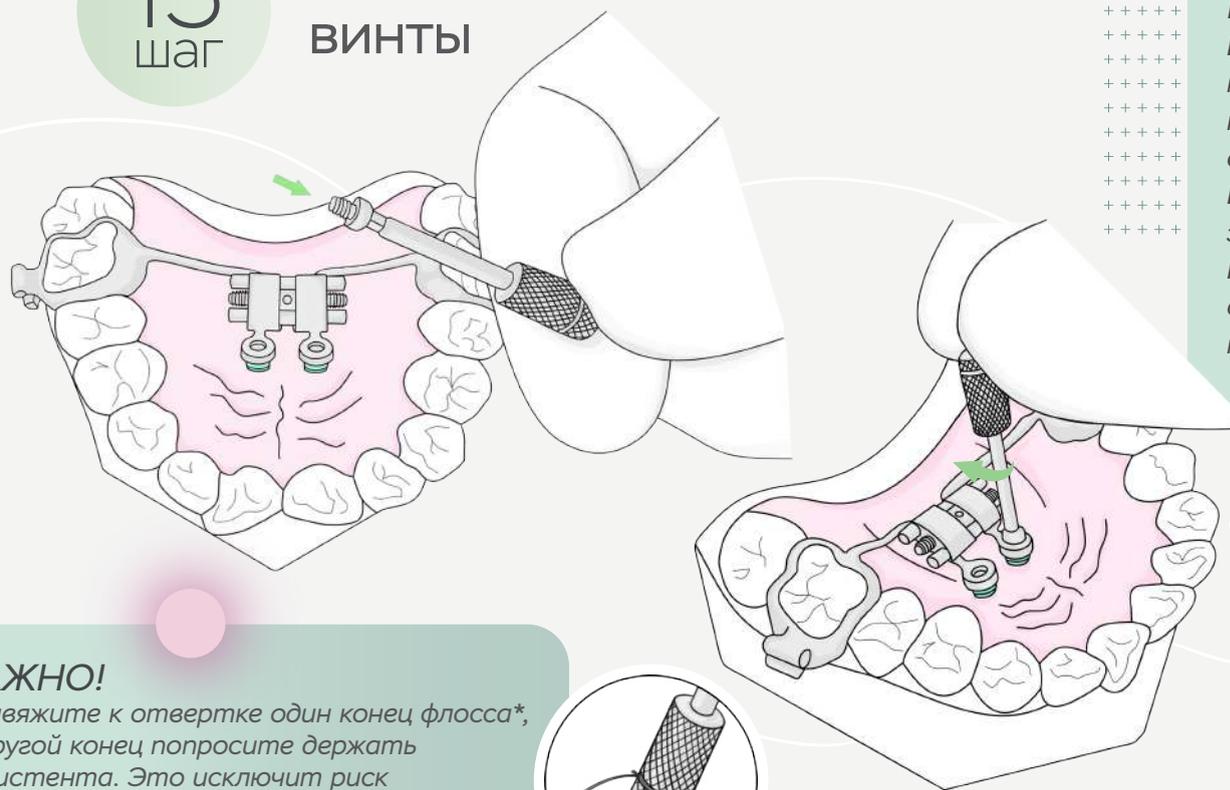

ВАЖНО!

Привяжите к отвертке один конец флосса*, а другой конец попросите держать ассистента. Это исключит риск попадания в глотку пациента.

*Для этого на отвертке есть канавка.


ВАЖНО!

Если Вы используете машинную отвертку, настройте параметры физиодиспенсера: торк – 15 Н*см, частота вращения – 30 об./мин. Если Вы используете ручную отвертку, закрутите винты с максимальным усилием. На каждом приеме проверяйте затяжку скрепляющих винтов и в случае необходимости затягивайте их повторно.

Для этого наденьте скрепляющий винт на конец ручной или машинной отвертки и закрутите его через опорный абатмент аппарата в головку винта Орто Изи. Для каждого последующего винта повторите процедуру.

16
шаг

Засветите композит
на кольцах

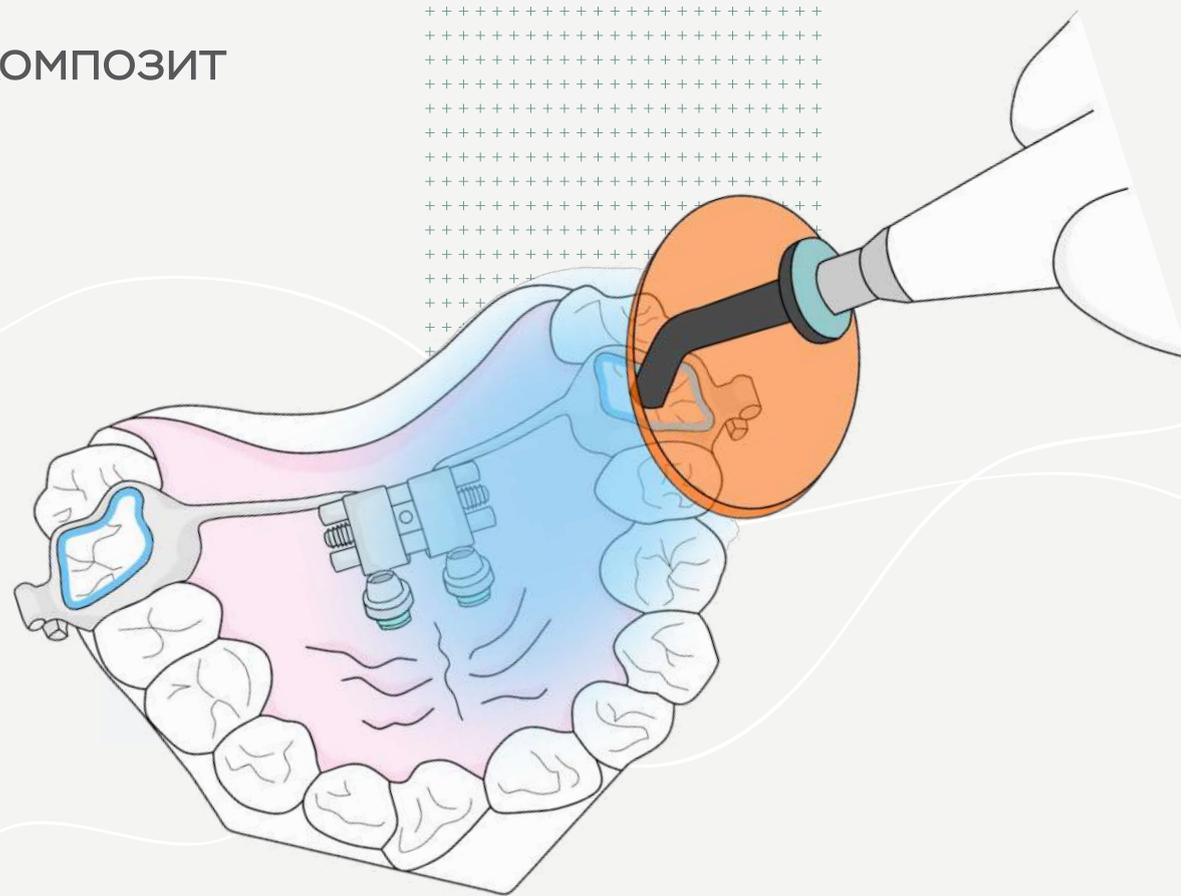

Продолжительность засветки зависит от модели
используемой лампы.

Поздравляем!
Вы успешно установили
аппарат FitFree!

